



Рекомендации по использованию экспресс-теста:

- Вскройте упаковку и достаньте тест-картридж
- Протрите место взятия крови спиртовой салфеткой
- Возьмите скарификатор, поверните колпачок на 90° и удалите его
- Плотно прижмите скарификатор к пальцу и нажмите кнопку
- С помощью пипетки перенесите каплю крови на тест-кассету. Затем капните 2 капли буферного раствора
- Оцените результат через 10 минут



Экспресс-тест на антитела IgG/ IgM SARS-COV-2 "SORBUS". Рекомендации предоставлены в ознакомительных целях. Перед проведением тестирования ознакомьтесь с основной инструкцией!


«ООО ИМТЭК фарма», 121552, г.Москва, вн.тер, г. Муниципальный округ Кунцево, ул. Ярцевская, д.34, к. 1, этаж 2, ком.9 / тел./факс: +7 (495) 107-00-80; +7 (495) 107-00-88



Тест на COVID-19 торговой марки “SORBUS”

Технические характеристики:

- Простота использования
- Высокая точность результатов
- Высокая чувствительность
- Высокая специфичность
- Скорость получения результатов: 10 мин
- Условия хранения: от 2 до 30°C
- Срок хранения: 2 года с даты производства
- Комплектующие отечественного производства

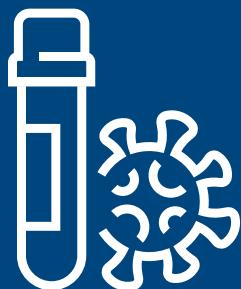

Экспресс-тесты для выявления антител - иммуноглобулинов класса M и G к вирусу SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в сыворотке, плазме и цельной крови человека



Антитела IgM появляются в организме вскоре после инфицирования, что может быть признаком заболевания коронавирусом



Антитела IgG вырабатываются на поздней стадии и остаются в крови долгое время, что может быть признаком перенесенной инфекции

Экспресс-тест является вспомогательным средством в диагностике и выявлении как признаков инфицирования вирусом COVID-19, так и уже перенесенного заболевания для всех групп населения

